

# Micro Pattern Plus    Mode d'emploi

C'est une résine autopolymérisable coulable pour la construction de:

- couronnes télescopiques et coniques
- attelles pour le soudage
- inlay / onlay / pièce jointe

Maryland

- Utilisation indirecte directe
- superstructures implantaires

## 2 Mode d'emploi:

### Préparation:

Placer la quantité correspondante de liquide et de poudre dans un bol à mélanger séparé.

### Technique de traitement au pinceau:

Trempez la pointe du pinceau dans le liquide, puis récupérez une petite quantité de poudre. La résine sur la pointe du pinceau peut être appliquée pour le modelage.

Après avoir terminé la modélisation, retirez-la et vérifiez la marge et la surface sur une épaisseur d'environ 0,3-0,4 mm

### Technique de la pâte:

Mélanger la poudre et le liquide jusqu'à obtenir la consistance souhaitée pour le type de traitement.

La modélisation, la combustion et la fusion s'effectuent de la même manière que la technique de la cire.

## 1 Contre-indications:

En cas d'allergie connue à un ou plusieurs ingrédients, le produit ne doit pas être utilisé. Si le matériau entre en contact avec la muqueuse buccale par application directe, rincer abondamment la bouche avec de l'eau.

### Avertissements:

- Si vous travaillez sur un modèle en plâtre, l'isolation doit être utilisée comme agent de séparation
- Nettoyez la brosse après utilisation ou, si nécessaire, pendant la procédure de travail avec le liquide
- Ne retournez aucun liquide ou poudre restant dans la bouteille

### 5 Mesures de conservation et de sécurité:

N'utilisez pas le matériel après la date de péremption. Conserver à des températures ne dépassant pas 25 ° C [77 ° F]. Protéger du soleil. Fermer les conteneurs immédiatement après utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales en matière d'élimination. Liquide et vapeur hautement inflammables.

N'utilisez pas le matériel après la date de péremption. Conserver à des températures ne dépassant pas 25 ° C [77 ° F]. Protéger du soleil. Fermer les conteneurs immédiatement après utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éliminer le contenu /

réceptif conformément aux réglementations locales en matière d'élimination. Liquide et vapeur hautement inflammables.

Conditionnement: 100g de poudre - 100ml de liquide

 Classe I



 Via Torrette Battifoglia Zona Industriale, Fraz. S.Andrea Delle Fratte, 06132 Perugia Italy P.Iva 03533540542  
[info@micropolymerdental.com](mailto:info@micropolymerdental.com)  
[www.micropolymerdental.com](http://www.micropolymerdental.com)

Phone: (+39) 327 4572 561 

Phone/Fax +39 0924 49 089 