

microPRESS H-Tec Gengiva Instrucciones de uso

Intensivo para la caracterización de la prótesis.

microPRESS H-Tec Gengiva es una resina fría autopolimerizable con nanotecnología con una alta carga de microperlas con baja contracción y menor absorción y liberación de monómero residual gracias a su estructura molecular esférica y de grano múltiple. Alta estabilidad del color con el nuevo catalizador. No contiene aminas terciarias ni cadmio.

microPRESS H-Tec Gengiva es el polvo microPRESS H-Tec saturado en dos colores LIGHT PINK y DARK PINK son dos colores rosa claro y rosa oscuro que, mezclados con la resina Rosa o Rosa veata, permiten la caracterización del reborde en la prótesis.

Los tonos naturales sombreados **Light Pink** se llevan a cabo rápida y fácilmente. Mezcle la resina para obtener una masa plástica que se modela fácilmente, mezcle y sature de acuerdo con su experiencia para la caracterización:

Los tonos naturales sombreados llevan un cabo rápido y fácil. Mezcle la resina para obtener una masa plástica que se modela fácilmente, mezcle y sature de acuerdo con su experiencia para la caracterización.

El rosa **Light Pink** oscuro se usa en áreas convexas, cerca de los bordes de la prótesis, donde se encuentran tonos naturales más oscuros..

Técnica de uso:

Mezcle microPRESS H-Tec Gengiva y mezcle con el polvo de la resina Rosa o Rosa Venato hasta obtener la saturación deseada, intente obtener una consistencia plástica fácilmente modelable

Aplique el rosa claro (**Light Pink**) como se describió anteriormente en las áreas cóncavas y el rosa oscuro (**Dark Pink**).

Manténgase húmedo con el líquido microPRESS H-Tec antes de cerrar el molde combinándolo con el modelo de yeso.

Al terminar la prótesis, es posible aplicar y caracterizar aún más en la superficie y dentro y fuera con los intensivos microAcryl super Color (ver instrucciones), siempre mezclándolos con la resina microPRESS H-Tec Rosa o Rosa Venato, al final cura adicional.