

## microAcry Bond Istruzioni d'uso

### Primer Resina/denti Resina/Resina

**microAcry Bond** è una Primer per condizionare le superfici degli acrilici in particolare modo per l'adesione dei denti alla resina per protesi mobile, dopo la pressata l'iniezione o la colata.

**microAcry Bond** è composto da metil metacrilato a base alcolica privo di glicerina a differenza dei classici liquidi di monomero delle resine a base di metil metacrilato

Dopo l'applicazione grazie alla base alcolica e all'assenza di glicerina, condiziona la superficie ed evapora velocemente, senza ungere la superficie della resina o dei denti di stecca, garantendo una ritenzione chimica perfetta.

### Tecnica d'uso:

Prima dell'applicazione si consiglia di fare delle ritenzioni con una fresa per resina o sabbiando con ossido di alluminio.

Applicare con un pennellino morbido aspettare 2-3 minuti l'evaporazione

microAcry Bond garantisce un'adesione chimica tra denti di stecca e resine acriliche, termopolimerizzanti a caldo ed a freddo

Confezioni: bottiglia 30 ml