

MicroAcry Bond Instrucciones de uso



Imprimación de resina / Dientes de resina / Resina

microAcry Bond es una imprimación para acondicionar superficies acrílicas en particular

para la adhesión de los dientes a la resina para prótesis móviles, después de presionar la inyección o el yeso.

MicroAcry Bond está compuesto de metacrilato de metilo a base de alcohol libre de glicerina, a diferencia de los líquidos monoméricos clásicos de las resinas de metacrilato de metilbase.

Después de la aplicación gracias a la base de alcohol y a la ausencia de glicerina, acondiciona la superficie y se evapora rápidamente, sin engrasar la superficie de la resina o las férulas, asegurando una perfecta retención química..

Técnica de uso:

Antes de la aplicación, se recomienda realizar retenciones con un cortador de resina o arenado con óxido de aluminio..

Aplicar con un pincel suave para esperar 2-3 minutos para la evaporación.

MicroAcry Bond garantiza una adhesión química entre férulas y resinas acrílicas, termopolimerización en frío y caliente.

Embalaje: botella de **30 ml.**



Phone: (+39) 327 4572 561  Phone/Fax +39 0924 49 089